


覆髄材
MTAフローホワイト

ULTRADENT

ENDGEZE™ MTA FLOW™ WHITE

ホワイトに生まれ変わって新登場
ナビチップ29Gからデリバリーできる新感覚MTAフロー

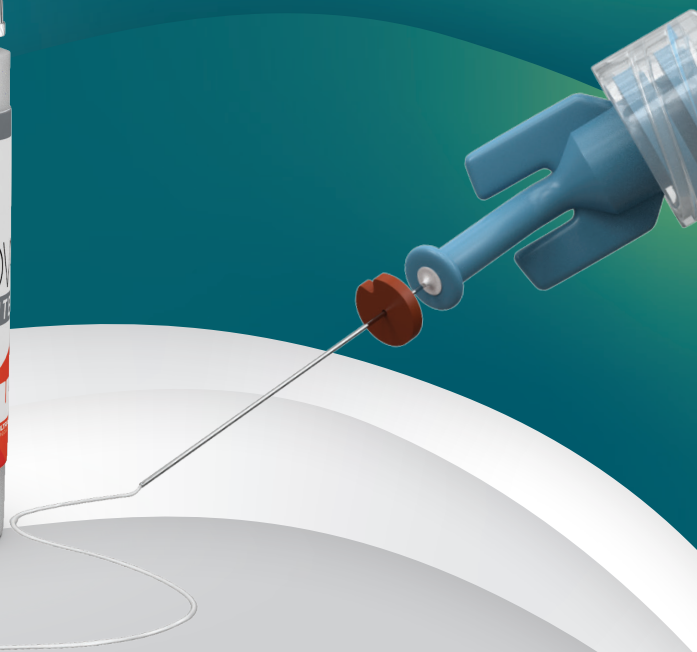


MTAのデリバリーは**ストレスフリー**でなくてはならない **MTAフローホワイト** ≈

近年、MTAセメントはその優れた特性から多くの臨床場面で使用されるようになりました。

その反面デリバリー方法は難しくテクニックを必要とするため、より良い操作性を求める声がありました。

2021年初めに発売されたMTAフローはデリバリーによる簡便性と操作性の良さで多くの注目を集めました。

そして、今回MTAフローはホワイトになって新登場します。審美ゾーンにもこれで安心。

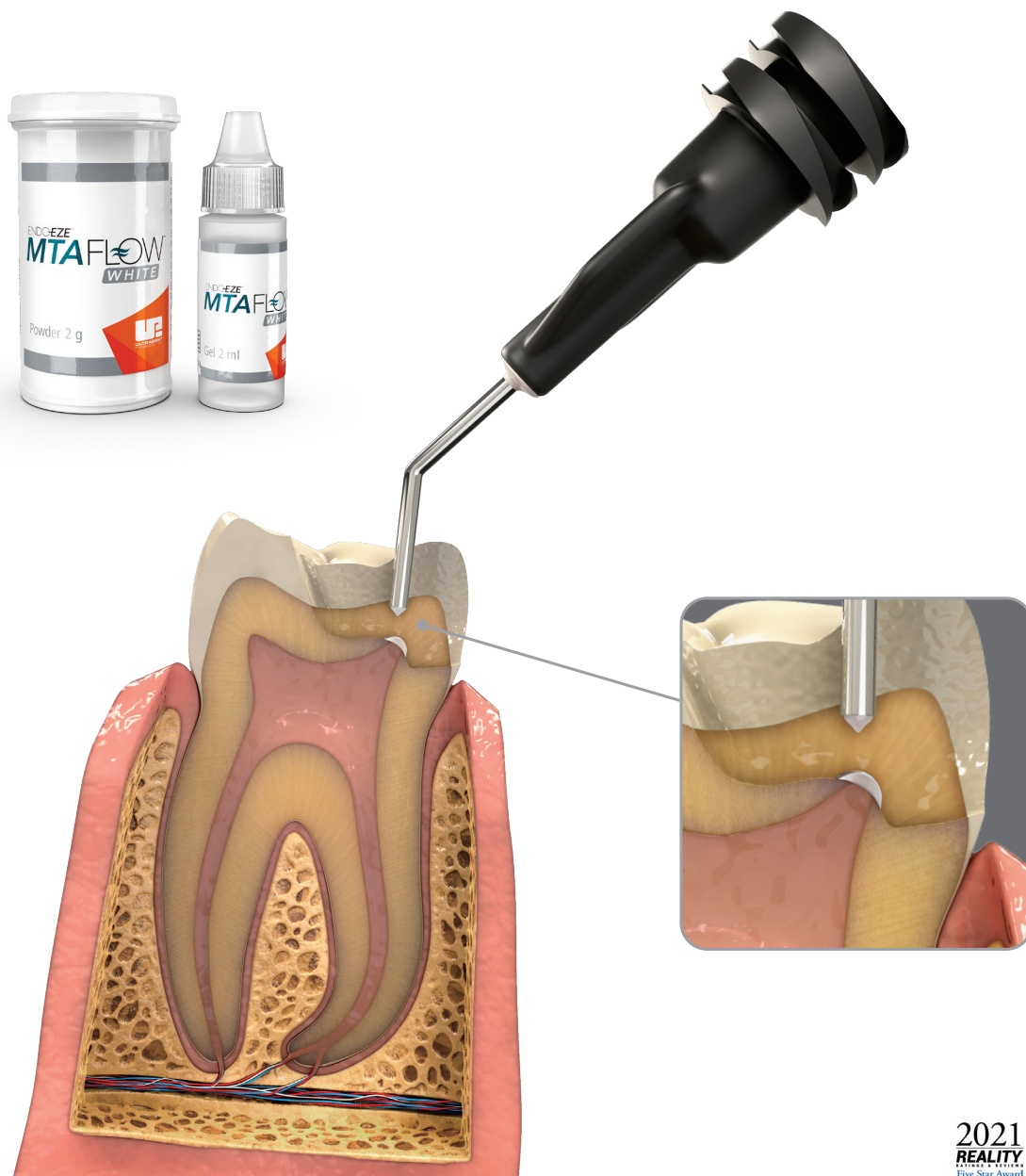


使用方法/ミキシングガイド


練和時間（目安）：1分
 練和後操作時間：15分以内
 硬化時間（目安）：105分（大2杯+3滴）

ミキシング方法

こちらのQRコードから
 動画をご覧ください。

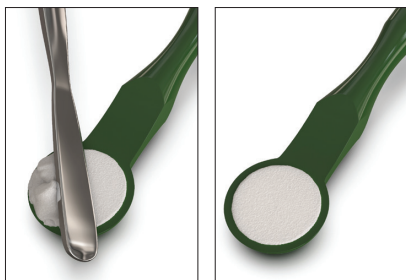

1. MTAフローパウダーを計量スプーンにて取り出した後（分量は下記テクニカルガイドを参照）、スパチュラを用いて余分なパウダーを落とし、必ず一定量のMTAフローパウダーを計り取ってください。

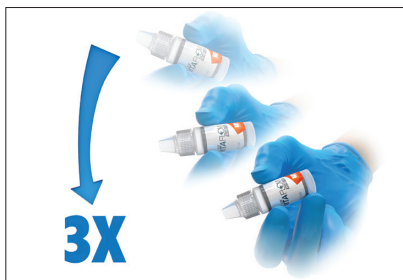

2. MTAフロージェルを開封する前に容器を上下に3回振ってください。その後、容器を傾け、容器先端側にジェルを移動させてから練和紙上に押し出してください。



3. MTAフロージェルとMTAフローパウダーをスパチュラで均一なペースト状になるように練和し、スキニシリンジに練和物を填入してください。



4. スキニシリンジ先端にマイクロチップを取り付けて、練和物を窩洞部位に少しずつ充填してください。




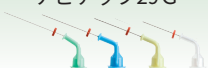
5. 練和後の操作時間は15分以内です。



6. ナビチップ29Gをスキニシリンジに取り付けて使用することも可能です。^{*1}

テクニカルガイド

用途に合わせてMTAフローホワイトの粘性をコントロールすることで様々な臨床ケースに対応することができます。

	スタンダード	ソフト	パテ
パウダー（粉）の分量	大スプーン2杯（0.26 g）	大スプーン1杯＋ 小スプーン1杯（0.19 g）	大スプーン1杯＋ 小スプーン1杯（0.19 g）
ジェルの分量	3滴	3滴	1滴*
練和後の粘性	普通	柔らかめ （程良い粘性）	固め （パテ状）
使用するチップ	マイクロチップ20 G 	ナビチップ29 G 	キャリアーを使用

*術者の好みに合わせて液の量は調節する

*1 MTAフローホワイトキットには、ナビチップ29Gは含まれておりません。別途購入が必要です。

製品仕様



5980-JP MTA フローホワイトキット

(8~10 アプリケーション分)

16,500円 (税別)

MTAフローホワイトパウダー (2g) × 1個

MTAフローホワイトジェル (2mL) × 1個

マイクロチップ20G × 20個

スキニシリンジ × 10本

ルアーロックキャップ × 10個

計量スプーン × 1個


関連製品

ナビチップ29G

*MTAフローホワイトキットには、ナビチップ29Gは含まれておりません。

ナビチップ29Gの長さを選択し、別途ご購入ください。

LOK-TITE™	mm	各20個 3,900円 (税別)	50個 7,200円 (税別)
ナビチップグリーン 29G	27	5115-JP	-
ナビチップブルー 29G	25	5114-JP	1376-JP
ナビチップイエロー 29G	21	5113-JP	-
ナビチップホワイト 29G	17	5112-JP	-
バラエティパック (各5個) 29G	27-17	5116-JP	-

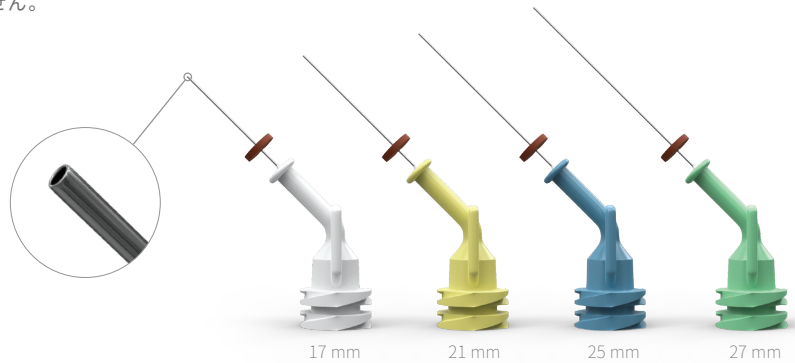

1680-JP スキニシリンジ 0.5mL

スキニシリンジ 0.5mL × 20本
2,500円 (税別)



1168 マイクロチップ (20G)

マイクロチップ × 20個
2,000円 (税別)



205 ルアーロックキャップ

ルアーロックキャップ ホワイト × 20個
1,700円 (税別)



販売名: MTA フローホワイト / 一般名称: 歯科用充填材料 / 管理医療機器 / 医療機器認証番号: 303AKBZX00089000
販売名: スキニシリンジ 0.5mL / 一般名称: 歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000012
販売名: ナビチップ 29G / 一般名称: 歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000001
販売名: マイクロチップ / 一般名称: 歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000016

ULTRADENT JAPAN 株式会社

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-34-14 初台 TN ビル 3F TEL (03) 5365-1760 FAX (03) 5365-1759
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-4 MF 新大阪ビル 4F TEL (06) 6151-3251 FAX (06) 6151-3252
第一種医療機器製造販売業 許可番号: 13B1X10086 ©2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

0120-060-751 | www.ultradent.jp