


Opalescence

● ● ● go™  
Tooth Whitening

新世代のホームホワイトニング材  
オパールエッセンスGo

ついに日本上陸

カスタムトレイ  
作製不要

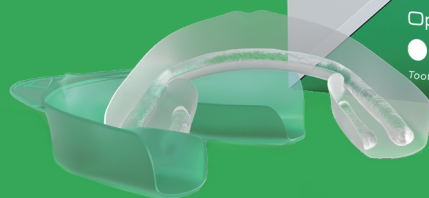

詳しい製品情報は  
こちらから



## オパールエッセンス Go は、

カスタムトレイ作製不要という簡便さを実現させたホームホワイトニングシステムです。歯列に合わせて形が変形する**ウルトラフィットトレイ**を使用しています。予めホワイトニングジェルが充填されたトレイにより場所を選ばず、好きな時にホワイトニングを行うことができます。

- ・口腔診断後、すぐに処方できるためケアタイム削減
- ・過酸化水素 6%
- ・使用時間は 1 日 90 分（連続 10 日間使用可能）

単回使用のトレイには予めジェルが充填されているので、下記工程が不要です。

**不要** トレイ作製  
ジェルの注入  
ホワイトニング後のトレイの洗浄

患者 1 名分  
10 日間の  
ホーム  
ホワイトニング  
キット



4634-JP  
オパールエッセンスGo  
ペイシエントキット  
(過酸化水素 6%)  
トレイ (上下顎) × 10 個  
患者様用取扱説明書 × 1 枚  
通常価格: 8,800 円  
※再使用禁止  
※外箱サイズ: 19.0cm × 10.8cm × 8.3cm

販売名: オパールエッセンス Go / 一般名: 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 / 高度管理医療機器 / 承認番号: 30300B2I00024000 / 冷蔵保存

## 使用方法



1. パッケージから製品を取り出します。  
「U」… 上顎用ホワイトニングトレイ  
「L」… 下顎用ホワイトニングトレイ



2. 上顎用トレイを歯面に装着します。



3. 軽く吸い込むようにして、トレイを歯面に密着させます。



4. 内側の白いトレイを歯に残したまま、外側の色付きのトレイを取り外します。下顎用のトレイに対しても同様に装着します。



5. 装着後、ホワイトニングトレイを取り外し、破棄します。歯を磨き余分なジェルを除去します。

With  
UltraFit™  
Tray

口腔内装着後、体温によって歯列に合わせて変形する**ウルトラフィットトレイ**は多くの症例に対応します。



装着前



装着後

## ONLINE SEMINAR

Opalescence  
go™  
Tooth Whitening  
Online Whitenin Class  
ホワイトニング教室

### 毎週開催

開催場所: オンライン会議システム Zoom  
定員: 100 名  
受講料: 無料  
時間: 13:00 ~ 13:40  
申込方法: 下記 QR コードよりお申込みください

\*開催日程は下記申し込みフォームよりご確認ください。

### 内容

オパールエッセンス Go の特徴・製品概要 / 従来品 (オパールエッセンス 10%) との違い / ホワイトニングメニューについて / 質疑応答

お申し込みは  
右の  
QR コードから！



本セミナーはオンライン会議システム Zoom を使用して行います。ご使用端末 (スマートフォンやタブレット端末) によっては Zoom アプリダウンロードが必要です。  
※オンデマンド配信の予定はありません。

